# ZOOM! Advanced Power\*

Chairside Zahnaufhellungssystem

Wow!



**Die völlig neu entwickelte Birne** erzielt mit dem erprobten ZOOM2 Gel beispiellose Ergebnisse.



Verbessertes optisches
Ausrichtungssytem für schnellere
Patientenvorbereitung und optimale Ergebnisse.
Gleichzeitige Aufhellung des Ober- und Unterkiefers.



**Feststellbare Rollen** für verbesserte Beweglichkeit und Stabilität.



Übersichtliches LCD Kontrolldisplay zum präzisen Nachverfolgen des Ablaufs und der Zykluszeiten.



**180° bewegliche Gelenke** und ein weiter "Bogenarm" für einfaches Justieren und bequemes Lagern.




# **ZOOM2 CHAIRSIDE ANWENDUNGSKIT IN DER DOPPELPACKUNG**

enthält alles um ca. bei der Hälfte aller Fälle B1 oder heller in nur 3 mal 15 Minuten zu erzielen.

VERBESSERTE LICHTAKTIVIERTE FORMULIERUNG des 25%igen Wasserstoffperoxid Gels.



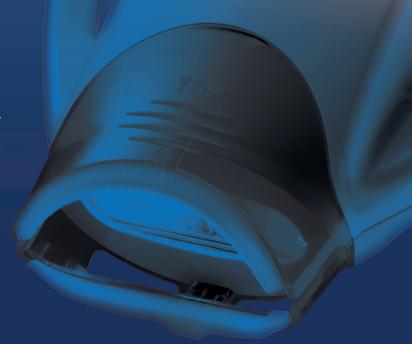






## Die beste Zahnaufhellung, die wir jemals hatten!

Patienten möchten ihre Zähne weiß - richtig weiß und richtig schnell. Wenn Sie auf das Ultimative bei Schnelligkeit und Effizienz gewartet haben, dann brauchen Sie nicht länger zu warten. Bieten Sie Ihren Patienten "state of the art" Zahnaufhellung an - ZOOM! Advanced Power.

### **Das Wow Erlebnis**

Die Hälfte aller Testpersonen mit Ausgangsfarben A erzielten B1 oder heller - in nur einer Sitzung.

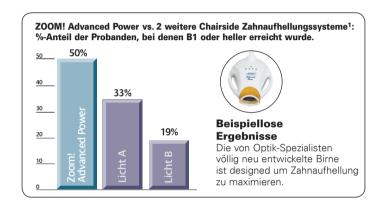

### **ZOOM! ADVANCED POWER AUFHELLUNGSLAMPE**

Das neue ergonomisch geformte Design und die feststellbaren Rollen erleichtern das Bewegen und Positionieren immens. Zusätzlich erhalten Sie mit jeder Lampe ein komplettes Trainingsvideo und eine Auswahl an Marketingmaterial.

- Deutlich reduzierte Stuhlbelegungszeiten durch nur 45 Minuten Beleuchtungszeit
- Überarbeitetes, modernes Design
- Feststellbare Rollen
- Angenehm für Patienten geringe Wärmeentwicklung
- Überzeugender Preis
- ZOOM! Schutzbrillen sind enthalten

### Leichter und angenehmer

Das ZOOM! Advanced Power optische Ausrichtungssystem ermöglicht schnelle und präzise Patientenvorbereitung für optimale Ergebnisse.


### **ZOOM2 CHAIRSIDE ANWENDUNGSKIT**

Die verbesserte und zum Patent angemeldete Formulierung des ZOOM2 Gels hat in einer klinischen Studie gezeigt, dass bei 50% der Probanden die Zahnfarbe B1 oder heller erreicht wurde, wenn die ZOOM! Advanced Power Lampe zum Einsatz kam. Das ZOOM2 Anwendungskit in der Doppelpackung enthält alles was für 2 ZOOM! Behandlungen benötigt wird.

- 4,6 g Wasserstoffperoxid in lichtaktivierter Zusammensetzung
- Patentierte Zwei-Kammern Technologie
- Verbessertes optisches Ausrichtungssystem
- ZOOM2 Vorbereitung für noch weniger Sensibilitäten
- Liquidam ein flüssiger, lichthärtender Kofferdam und alles was weiterhin zur Isolation notwendig ist
- Satin Finish Nachbehandlung 5% iges Kaliumnitrat und 0,22% iges Natriumfluorid, um die Sensitivitäten noch weiter zu reduzieren
- Patienteninformation zum Erhalten des Zahnaufhellungsergebnisses

### Wie die ZOOM! Advanced Power Lichtaktivierungstechnologie funktioniert

Das ZOOM2 Gel wirkt aufgrund der Photo-Fenton-Reaktion von Peroxid und Eisen. Die Peroxidkomponente reagiert mit dem Eisen wobei freie Radikale (sogenannte "stain terminatoren") entstehen. Die Lichtreaktion erneuert zyklisch das Eisen, wodurch die Produktion freier Radikaler anhält - dies verbessert das Aufhellungsergebnis signifikant.

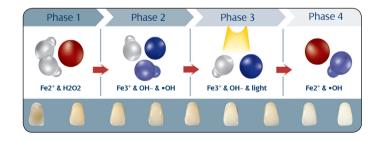

Nur durch zahnärztliches Fachpersonal anzuwenden

Die ZOOM!® Advanced Power™ Lampe funktioniert ausschließlich mit dem ZOOM! Patientenkit.

Discus Dental im Direktvertrieb! Preise, Infos, Angebote? Wir sind direkt für Sie da: Deutschland 08 00 - 4 22 84 48 08 00 - 44 99 80 gratis!

D 20-1471 1006



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Daten auf Anfrage erhältlich. Mit Vitapan<sup>©</sup> Classical Farbskala, sortiert nach Farbwerten, gemessen. Durchschnittswerte wurden bei der Aufhellung von A-Farben gemessen. Geringere Werte sind bei der Aufhellung von C- und D-Farben möglich. Vita und Vitapan sind eingetragene Warenzeichen der Vita Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG, Bad Säckingen.